

NAVINA CLASSIC
FÜR IHRE
UNABHÄNGIGKEIT
Ein intuitives, bequemes und benutzerfreundliches
System zur transanal Irrigation (TAI)



Navina™ Classic



„Mein Darm hält mich nicht länger davon ab, das zu tun, was ich tun möchte.“

Anne, Norwegen

Ein intuitives und benutzerfreundliches System zur transanalen Irrigation, das Ihnen das Selbstvertrauen gibt, wieder spontan zu sein.

Wenn Sie unter Darmfunktionsstörungen wie Verstopfung und Stuhlinkontinenz leiden, schränkt Sie das in Ihrem alltäglichen Leben ein. TAI ist eine effektive und sichere Methode, um eine Toilettenroutine zu entwickeln.^{1,2} Wenn Sie wieder Vertrauen in Ihren Körper haben, können Sie Pläne machen wie z. B. Restaurant- und Kinobesuche und spontan sein.

Erste Schritte mit TAI

Navina™ Classic ist benutzerfreundlich und hilft Ihnen bei den Herausforderungen Ihrer Darmfunktionsstörung. TAI kann die regelmäßige Darmentleerung und das Wohlbefinden nur mithilfe von lauwarmem Wasser wiederherstellen. Wenn Sie gewöhnlich mehrere Stunden auf der Toilette verbringen, kann TAI diese Zeit erheblich reduzieren. Es ermöglicht Ihnen, mit Integrität und Würde zu irrigieren und die Kontrolle zu behalten.

Das Navina System zur transanalen Irrigation ist eine natürliche und sichere Methode, den Darm zu entleeren. Indem Wasser über einen Katheter in das Rektum instilliert wird, regt dieses die Darmbewegung an, so dass dieser effektiv auf natürliche Weise entleert wird. TAI mit Navina Classic sollte im Sitzen auf der Toilette durchgeführt werden.

Konzentriert auf Ihr Wohlbefinden

Navina Classic wurde zusammen mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal entwickelt, um TAI zu vereinfachen und eine bessere Möglichkeit für mehr Menschen zu bieten. Die TAI mit Navina Classic lässt Sie selbstbestimmt entscheiden, wann und wo Sie diese durchführen, um Ihnen Unabhängigkeit und mehr Möglichkeiten für Beruf, Reisen oder Freizeit zu bieten.



Navina Classic

Navina Classic wurde speziell für die Bedürfnisse des Anwenders entwickelt und ist ein zuverlässiges und praktisches System für das langfristige Darmmanagement, bei dem lediglich lauwarmes Wasser verwendet wird. Es ist manuell und Dank der großen farblich gekennzeichneten Bedienelemente intuitiv und einfach zu erlernen und zu handhaben. Die kontinuierliche Anwendung von TAI sichert eine regelmäßige Darmroutine und schenkt Ihnen mehr Unabhängigkeit.

Austauschbare Navina Systeme

Bei der Verwendung von Navina Classic für die transanale Irrigation haben Sie die Möglichkeit, dasselbe Gerät mit einem kleinen, einem regulären oder einem konischen Rektalkatheter zu nutzen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, das System individuell anzupassen.



„Es verhindert nicht nur Stuhlinkontinenz,
sondern gibt einem auch Kontrolle über den
Zeitpunkt und Ort der Darmentleerung.“

Mikey, UK

Verwendungszweck

Navina Systems ist für die transanale Irrigation bestimmt, bei der Wasser mit Hilfe eines Rektalkatheters in den unteren Teil des Dickdarms instilliert wird.

Indikationen

Navina Systems soll Erwachsenen und Kindern ab 3 Jahren helfen, die an Stuhlinkontinenz, chronischer Verstopfung und/oder einem zeitaufwändigen Darmmanagement leiden. Durch das Instillieren von Wasser in den unteren Teil des Dickdarms können die peristaltischen Muskeln im Darm angeregt werden und beginnen, den Inhalt des unteren Kolons und des Rektums zu entleeren.

Kontraindikationen

Verwenden Sie Navina Systems NICHT, wenn einer der nachfolgenden Punkte zutrifft:

- bekannte anale oder kolorektale Stenose
- aktive entzündliche Darmerkrankung
- akute Divertikulitis
- Darmkrebs
- ischämische Kolitis
- innerhalb 3 Monate nach einer analen oder kolorektalen Operation
- innerhalb 4 Wochen vor der endoskopischen Polypektomie

Da die Liste möglicherweise nicht vollständig ist, wird das medizinische Fachpersonal immer auch individuelle Faktoren berücksichtigen. Vor Gebrauch beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Referenzen

1. Emmanuel. Spinal Cord. 2010. 48(9): p. 664-673
2. Christensen and Krogh. Scand J Gastroenterol. 2010. 45: p. 517-527

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric[®] und Navina[™] führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren, und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

Wellspect. A real Difference

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Website. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

[wellspect.de](https://www.wellspect.de)



[wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

[wellspect.at](https://www.wellspect.at)

